


LiquiBand® Surgical S

Erittäin vahva butyyliipohjainen syanoakrylaatti, jossa on kaksi monipuolista applikaattorikärkeä.

					
MIKROBIESTE	NOPEA KUIVUMISAIKA	KAKSOIS-APPLIKAATTORI	VEDEN-KESTÄVÄ	SÄILYTYS HUONEEN-LÄMMÖSSÄ	VALMISTETTU ISOSSA-BRITANNIASSA

✓ VAHVA JA TURVALLINEN

- ▶ Butyyli-oktyyliseos takaa vahvan primaarin sulkemisen ja joustavan sidoksen
- ▶ Tehokas mikrobieste gram-positiivisille ja gram-negatiivisille mikrobeille sekä sienimikrobeille

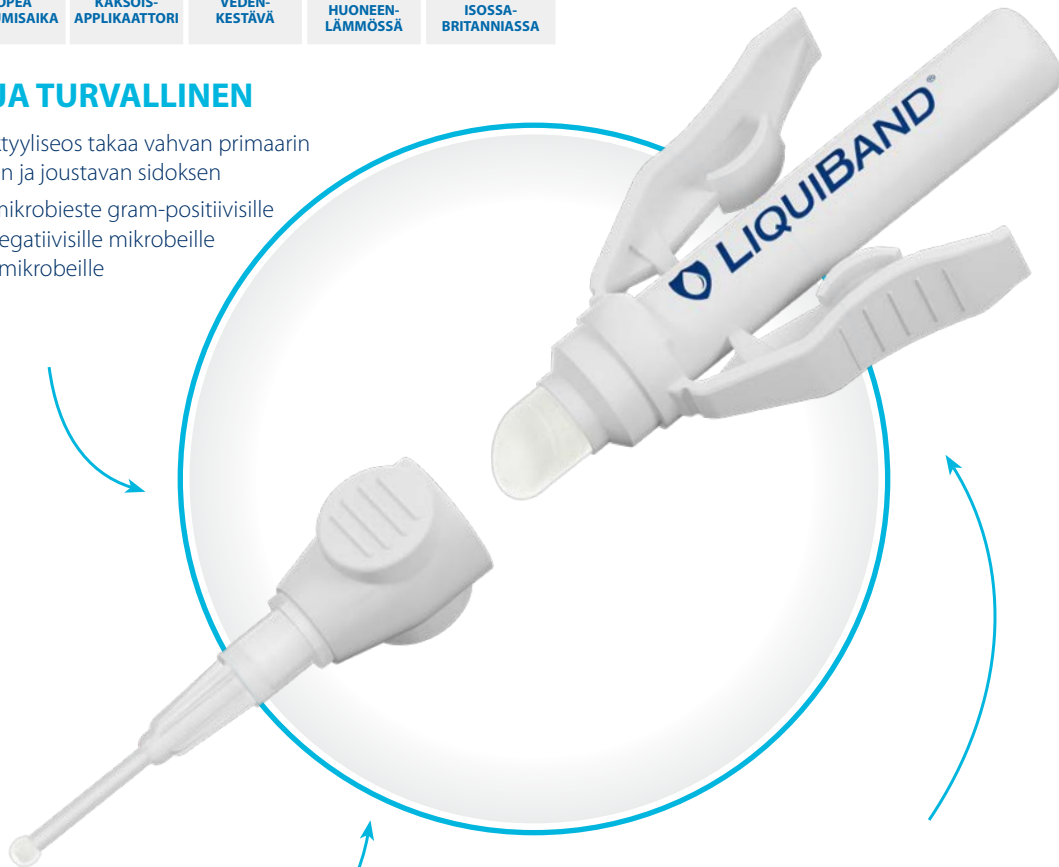

✓ NOPEA JA TARKKA

- ▶ Nopea 10 sekunnin kuivumisaika
- ▶ Liiman hallittu sijoitus

✓ MONIPUOLINEN APPLIKAATTORI

- ▶ Siipiapplikaattori mahdollistaa helpon ja turvallisen valmistelun ja annostelun
- ▶ Flow Control -kärki hallittuun annosteluun
- ▶ Viisto kärki leveämpään annosteluun

Annosteluohje *LiquiBand® Surgical S*

✓ 1. VAIHE

- ▶ Varmista ennen haavan sulkemista, että se on täysin puhdas ja kuiva.
- ▶ Pidä applikaattoria pystyasennossa ja purista samalla sen siipiä, kunnes kuulet rikkoutumisäänen.



✓ 2. VAIHE

- ▶ Käännä kärki alaspäin ja valmisteleva applikaattori puristamalla siipiä varovasti.
- ▶ Kun kärki täyttyy liimalla, LiquiBand® Surgical S on käyttövalmis.




✓ 3. VAIHE

- ▶ Pidä haavan reunoja yhdessä ja annosteleva samalla yksi tasainen kerros LiquiBand® Surgical S -liimaa haavan pituudelta.
- ▶ Jatka haavan reunojen pitämistä yhdessä 10 sekunnin ajan.



Paikallisten syanoakrylaattien ja ompeleiden suhteelliset lujuudet¹

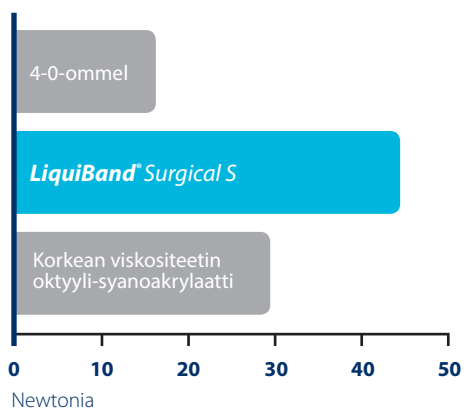

Viitteet 1. Data on file at Advanced Medical Solutions Limited.

✓ 4. VAIHE (valinnainen)

- ▶ Kierrä applikaattorin tarkkuuskärkeä vastapäivään ja irrota tarkkuuskärki.
- ▶ Viisto kärki mahdollistaa leveämmän annostelun



LiquiBand® Surgical S

Koko	Määrä/laatikko	Tuotekoodi	NHS SC -koodi
0,8 g	6	LBS-S0001	FVF 014